

Aspen Tri-Point FSO[®] Skoliose Entlastungsorthese

Die revolutionäre Aspen Tri-Point FSO ist eine Frontal-Sagittal-Orthese, die als eine Entlastungsorthese fungiert und einen natürlichen Körperschwerpunkt wiederherzustellen hilft. Sie hilft bei der Schmerzlinderung und Steigerung von Lebensqualität bei erwachsenen Patienten mit Wirbelsäulen-Ausrichtungsdeformitäten und Wirbelsäulen-Haltungsschwierigkeiten, die verursacht wurden durch:

- Degenerative Skoliose bei Erwachsenen
- Ideopathische Skoliose bei Erwachsenen
- Parkinson-Krankheit
- Wirbelsäulenverletzungen
- Zerebralparese
- Multiple Sklerose
- Brown-Séquard-Syndrom
- Hemiplegie/nach zerebral-vaskulären Unfällen,
z.B. Schlaganfall, Hirn-Schädeltrauma

Verstellbare Universalgröße minimiert die Lagerhaltung

Aspen's patentiertes Verstellmechanismus, sowie die gut sichtbaren Größenmarkierungen erlauben eine schnelle und einfache Anpassung. Vertikale Stäbe sorgen für Stabilität, können aber auf Wunsch einfach entfernt werden, um die Höhe des Gurtes zu verringern ggf. den Tragekomfort zu erhöhen. Die richtige Größe ist somit immer verfügbar, mit der man ein breites Spektrum an Patientenanatomien mit unterschiedlichen Umfängen bestmöglich versorgen kann.





Aspen Aktiver Einfluss-Orthesen wurden entwickelt, um die Körperfehlhaltung zu korrigieren und eine Verbesserung dieser zu erzielen.



Aspen's Ortheseneingruppierung unter der Bezeichnung „Aktiver Einfluss-Orthesen“ sind speziell dafür entwickelt, um Patienten die unter chronischen Haltungsbeschwerden leiden zu helfen. Diese innovativen Orthesen unterstützen die Körperhaltung mit dem Ziel die Symptome (1) zu reduzieren, die durch dessen Disbalance entstehen. Aspen Aktiver Einfluss-Orthesen unterstützen ebenfalls die Zielsetzung, eine symmetrische Belastung auf die Wirbelsäule zu erreichen, damit ein natürlicher Körperschwerpunkt und die Verbesserung des Gleichgewichtes eintreten kann.

Unterstützt mehr den natürlichen Körperschwerpunkt

Durch ein unelastisches Kompressionssystem setzt die Aspen Tri-Point FSO Kräfte ein, die für eine bessere Ausrichtung, zur Verbesserung der Haltung in allen drei anatomischen Ebenen, zusammenarbeiten.

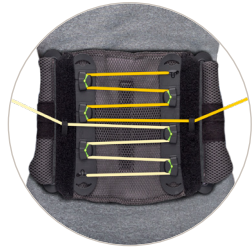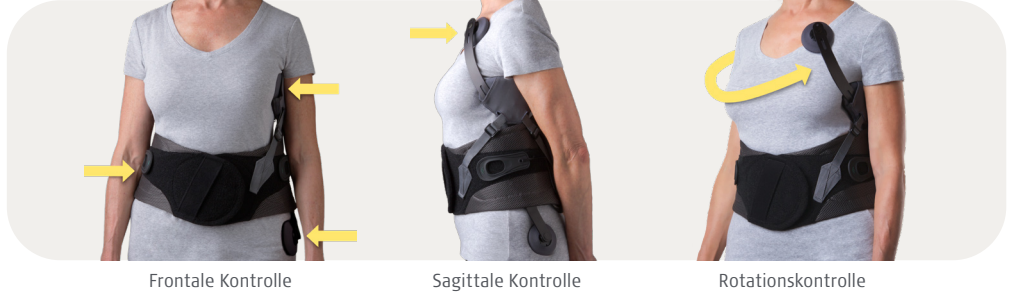

Kompressionssystem, einfach in der Handhabung

Mit Aspens patentiertem SlickTrack™ Zugsystem kann der Patient die Kompression im oberen und unteren Bereich unabhängig voneinander regeln und die Kompression dort anlegen, wo sie am besten wirken kann.

Verstellbare Spannungs-Klettgurte

Um den Winkel, unter dem die Spannung appliziert wird zu verändern, können die Klettgurte beliebig den Patientenbedürfnissen entlang der Achse platziert werden.

Universalstreben

Kann auf dem Gürtel frei bewegt werden, wodurch eine optimale Positionierung für den Patienten gewährleistet ist. Ist mit einem Hakenverschluss für einen sicheren Halt befestigt.



Konzipiert für Individuelle Patientenbedürfnisse

Dank der Vielzahl an Konfigurationsmöglichkeiten kann der Therapeut die Behandlung individuell auf den Patienten einstellen. Mit dem Modulsystem kann der Therapeut die Orthese individuell zusammenstellen, um eine bestmögliche Versorgung zu gewährleisten.



Viele Möglichkeiten - eine Orthese

Konfigurationsset mit Doppelstreben



Verbessertes Zugsystem

Reduziert die Reibung, macht es einfach die gewünschte Kompressionsstufe einzustellen, ungeachtet der individuellen Kräfteinwirkung des Patienten.

Bequeme Handschlaufen

ermöglichen ein einfaches An- und Ablegen der Orthese.

FÜR TAILLEUMFANG VON 61-114 CM UND BIS ZU 139 CM IN VERBINDUNG MIT EINEM ASPEN ERWEITERUNGSGURT

BEINHALTET: • Gebrauchsanleitung • Patientenhandbuch • Aspen Tri-Point FSO-Orthese • Universalstreben • Seitenplatte mit Beckenkammrolster • Bruststrebe und Brustpolster • Tragetasche	Verstellbare Universalgröße - 61-114 cm	591911
	Konfigurationsset mit Doppelstreben	993905
	Aspen Erweiterungsgurt für zusätzliche Länge - 25 cm	992505