

Aspen Vista™ MultiPost Therapie Zervikalorthese

Die Aspen Vista MultiPost Therapie Zervikalorthese wurde entwickelt, um Probleme im Hals- und Nackenbereich, wie etwa die vorgestreckte Kopfhaltung („Handynacken“) zu behandeln. Eine unnatürliche Kopfhaltung kann die Halswirbelsäule aus ihrer natürlichen Ausrichtung bringen und so zu Radikulopathien, Neuropathien und zervikogenen Schmerzen führen. Wird eine unnatürliche Kopfhaltung nicht behandelt, so kann die ungleichmäßige Belastung der Halswirbelsäule irreparable Schäden an Bandscheiben, Wirbeln, Bändern und Muskeln anrichten. Die Aspen Vista MultiPost Therapie Zervikalorthese unterstützt die Kopfhaltung sowie die natürliche Ausrichtung der Halswirbelsäule und trägt dadurch aktiv zur Behandlung der beschriebenen Probleme bei.

Aktive Behandlung im Komfort der eigenen vier Wände



Aspen Aktiver Einfluss-Orthesen wurden entwickelt, um die Körperfehlhaltung zu korrigieren und eine Verbesserung dieser zu erzielen.



Aspen's Ortheseneingruppierung unter der Bezeichnung „Aktiver Einfluss-Orthesen“ sind speziell dafür entwickelt, um Patienten die unter chronischen Haltungsbeschwerden leiden zu helfen. Diese innovativen Orthesen unterstützen die Körperhaltung mit dem Ziel die Symptome¹ zu reduzieren, die durch dessen Disbalance entstehen. Aspen Aktiver Einfluss-Orthesen unterstützen ebenfalls die Zielsetzung, eine symmetrische Belastung auf die Wirbelsäule zu erreichen, damit ein natürlicher Körperschwerpunkt und die Verbesserung des Gleichgewichtes eintreten kann.

1. Fabio Zaina, Martina Poggio, Sabrina Donzelli, and Stefano Negrini. "Can Bracing Help Adults with Chronic Back Pain and Scoliosis? Short-Term Results from a Pilot Study." *Prosthetics and Orthotics International*. 2018.



Eingebaute Luftpumpe [Ⓐ]

Die leicht erreichbare Luftpumpe und das Druckablassventil erlauben es den Patienten, die für sie richtige Kompressionsstufe schnell und problemlos einzustellen.


Behandlung der vorgestreckten Kopfhaltung [Ⓐ]

Die Zervikalorthese übt leichten Druck auf Kinn und Nacken aus und wirkt so der durch die vorgestreckte Kopfhaltung verursachten unnatürlichen Lastverteilung entgegen. Diese einzigartige Vorrichtung kann bequem in den eigenen vier Wänden getragen werden und hilft durch ihr fortschrittliches Design gegen zervikogene Kopfschmerzen, Radikulopathie und allgemeine Schmerzen im Hals- und Nackenbereich.



Verstellbare Universalgröße [Ⓐ]

Das patentierte Größenverstellsystem bietet sechs verschiedene Einstellmöglichkeiten für eine Vielzahl von unterschiedlichen Patientenanatomien und erlaubt eine problemlose Anpassung direkt am Patienten.

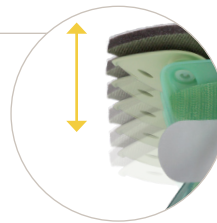

Einmalige Anpassung [Ⓐ]

Sobald der Verschlussstreifen auf der linken Seite korrekt angepasst wurde, können die Patienten beim erneuten Anbringen der Orthese die richtige Enge und Position ganz einfach selbst einstellen.




Aktive Beeinflussung der Kompressionsstufe [Ⓐ]

Die Vorrichtung dient als therapeutische Nackenstütze und trägt aktiv zu einer natürlicheren Kopfhaltung bei. Durch die NEWmatix-Kompressionskissen werden Wirbelsäule, Bandscheiben und Nerven entlastet – und so die Heilung und Linderung von Symptomen unterstützt.

Zielgenaue Therapie [Ⓐ]

Das Aspen Therapie-Gelkissen für Hitze- und Kältetherapie wurde zur Linderung von Entzündungen und Krämpfen entwickelt. Durch die Positionierung in der Nackenplatte kann die Kompression genau an den gewünschten Stellen angesetzt werden.

DAS
NEWMATIX™
SYSTEM
THERAPIE-
GELKISSEN

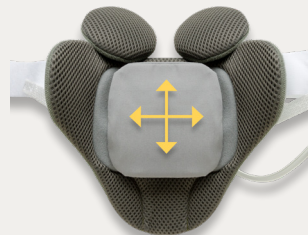

Aspen Vista™ MultiPost Therapie Zervikalorthese

984250

Aspen Vista™ MultiPost Therapie Zervikalorthese Ersatzpolster

984252

Aspen Vista™ MultiPost Therapie Zervikalorthese Ersatz Kinnpolster

984255

Aspen Vista™ MultiPost Therapie Zervikalorthese Ersatz Gelkissen

984257